

SeniorLine PRO Lanzette von Cignus

PZN:14235652 Hilfsmittel-Nummer:21.99.99.1008

Sicherheitslanzette für den Einmalgebrauch:

Eindringtiefe: 1,5mm

Durchmesser: 28 G (0,375mm)

Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:

Alle Kapillaruntersuchungen, für die eine sehr geringe Blutmenge ausreichend ist



SeniorLine PRO Lanzetten erfüllen alle Anforderungen der TRBA250 und der EU-Richtlinie 2010/32/EU für den sicheren Einsatz von scharfen und spitzen Instrumenten.

Die Nadel ist nicht nur vor dem Einsatz verborgen, sondern wird auch nach dem Gebrauch automatisch in das Gehäuse zurückgezogen und verhindert somit unnötige Nadelstich-Verletzungen und mögliche Kontaminationen.

Durch die Verriegelung der benutzten Lanzette wird zudem eine Mehrfachnutzung ausgeschlossen.

Zusätzlich kann die geriffelte Kopfseite der Sicherheitskappe in die Lanzette gesteckt werden um möglich Kontakt mit Blut zu vermeiden.


Unbenutzte Nadel




Benutzte Nadel mit aufgesetzter Sicherheitskappe




Anwendung:

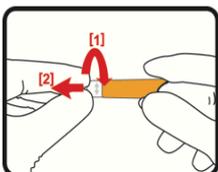


Die Sicherheitskappe **abdrehen** und **gerade herausziehen**.

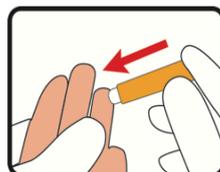

Die Wellion SAFETYLANCET Lanzette **fest gegen die beabsichtigte Einstichstelle drücken** und somit die Lanzette auslösen.

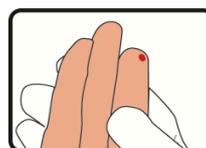

Sanften Druck in regelmäßigen Abständen in **Richtung der Einstichstelle ausüben**, um die benötigte Menge an Blut zu erhalten.

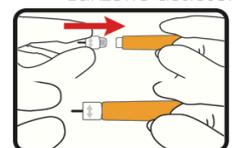

Danach kann die **geriffelte Kopfseite der Sicherheitskappe in die Lanzette gesteckt** werden um möglichen Kontakt mit Blut zu verhindern.